

Eva Sahlén

## Checklista Att tänka på vid installation av digital tillsyn

Målgrupp: Personal som installerar produkten. Ofta ges även information till den enskilde vad som gäller, men detta behandlas i annat material.

### Placering av produkt

- Säkerställ att hela sängen syns tydligt och att det inte finns några hinder i vägen (Centrera objektet).
- Placering av kameran kan antingen göras på en möbel alternativt skruvas dit. Om åverkan sker på vägg/tak, informera vad som gäller avseende återställning när kameran tas bort (är det något kommunen ansvarar för eller inte). Säkerställ att kameran har en god placering och inte riskerar att vältras omkull enkelt eller att fästena lossnar.

### Säker och snygg installation

- Försök att göra en så säker installation som möjligt (minskad fallrisk vid sladdar och mindre risk att sladdar dras ut). Detta kommer oftast även leda till att installationen blir "snygg" med kablar som löper längs med lister och liknande.
- Få gärna kameran att smälta in i miljön så att man inte stör sig på den genom att exempelvis placeras den i en bokhylla.
- Finns det blinkande lampor som lyser på kameran så tejpa över dessa, det finns personer som stör sig på detta.